
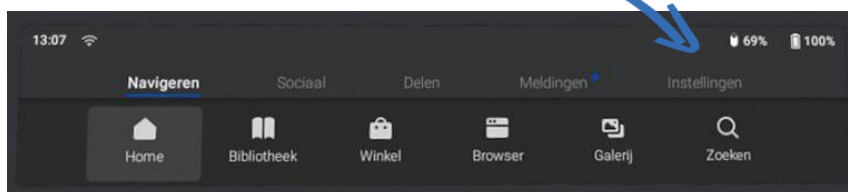


# Wifi-verbinding maken


## *op de Oculus Go*

De Oculus Go moet zijn verbonden met een **privé** of **openbaar Wi-Fi-netwerk** om de laatste updates te kunnen downloaden. Deze instellingen worden bij oplevering goed gezet, maar kunnen door omstandigheden opnieuw ingevoerd moeten worden (bijv. bij wijziging van het wifiwachtwoord).

1. Schakel je Oculus Go in en zet je headset op.
2. Sluit de Psylaris applicatie af als deze opgestart is. Duw hiervoor 1x kort op de -knop op de controller en klik op Afsluiten.
3. Selecteer Instellingen in het onderste werkbalkmenu.



4. Selecteer Wi-Fi.

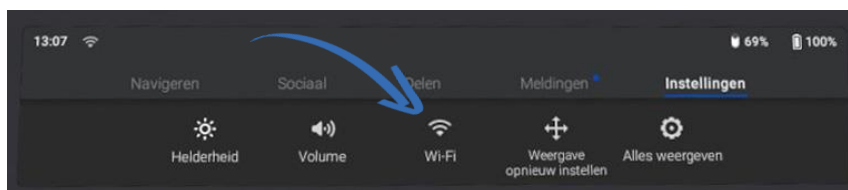

5. Selecteer het Wi-Fi-netwerk waarmee je verbinding wilt maken.
6. Voer het wachtwoord in van het Wi-Fi-netwerk waarmee je wilt verbinden zodra hier om wordt gevraagd.
7. Selecteer Verbinden om verbinding te maken met het netwerk.

Netwerken die vastgezette portalen gebruiken (denk aan “Internet in de trein”), kunnen in sommige gevallen niet compatibel zijn met de Oculus Go. Als je een foutmelding krijgt bij het verbinden met een Wi-Fi-netwerk, moet je je Oculus Go mogelijk met een ander Wi-Fi-netwerk verbinden.