



Psylaris Dashboard

Om een cliënt aan de slag te laten gaan moeten er een paar stappen doorlopen worden via het dashboard: <https://login.psylaris.nl>


Deze stappen lichten we hier even toe, zodat je vol vertrouwen aan de slag kunt:

[Cliënt aanmaken](#) • [Behandeling aanmaken](#) • [Synchronisatie met VR-bril](#)

Stap 1: Cliënt aanmaken

Eerst gaan we de cliënt toevoegen aan het systeem.

- Klik op [Cliënt aanmaken](#) onder Quick access, of  op de pagina [Cliënten](#):

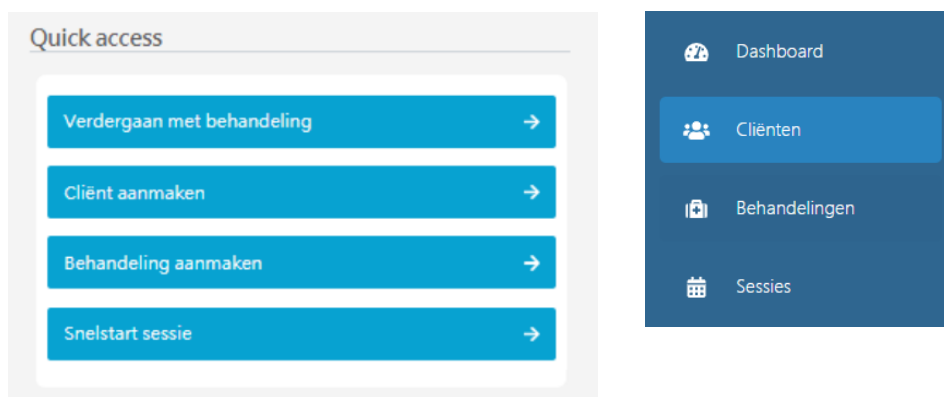

- Vul bij [Naam](#) de identifier in waaronder de cliënt bekend is, bijv. een dossiernummer:

Cliënt aanmaken ✕

Selecteer een team

psylaris team ✕ ▾


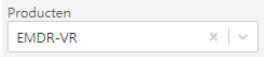
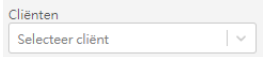

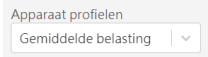

Naam *

[Cliënt aanmaken](#)

- Klik op de knop [Cliënt aanmaken](#) om te bevestigen.
- Je hebt zojuist succesvol de cliënt toegevoegd!

Stap 2: Behandeling aanmaken

De cliënt die we zojuist hebben aangemaakt, gaan we nu toewijzen aan een behandeling. Aan deze behandeling geven we instellingen mee.

- Klik op **Behandeling aanmaken** onder Quick access, of  op de pagina **Behandelingen**.
- Controleer of onder Producten **EMDR-VR** geselecteerd is: 
- Selecteer de cliënt die je zojuist hebt aangemaakt:
Tip: Je kunt deze gemakkelijk vinden door ernaar te zoeken via het tekstveld van dit dropdownmenu. 
- Selecteer de bril waarmee deze cliënt aan de slag gaat:
Tip: Het brilnummer staat duidelijk aangegeven op de bril met een sticker. Is dit niet meer het geval, neem dan contact op met de projectleider. 
- Selecteer het werkgeheugen profiel:
Dit is een grove inschatting van welke mate van werkgeheugenbelasting de cliënt aankan. In de meeste gevallen is Gemiddeld de juiste keuze. 
- Controleer even of de instellingen kloppen.
Op de laatste pagina leggen we uit wat deze instellingen precies betekenen.
- Als alles goed uitziet, kun je op **Behandeling aanmaken** klikken: 

Stap 3: Synchronisatie met VR-bril

De instellingen worden nu verstuurd naar de headset.

De VR-bril probeert op 2 momenten verbinding te maken:

1. Wanneer de EMDR-VR **applicatie** wordt opgestart.
2. Wanneer de EMDR-VR **sessie** wordt opgestart.

Totdat één van bovenstaande acties heeft plaatsgevonden, zal de volgende melding op het scherm blijven staan:

We proberen connectie te maken met het apparaat.. Even geduld aub..

Op het moment dat de verbinding gemaakt is en de instellingen verstuurd zijn, verandert deze melding naar:

De connectie met het apparaat is gelukt.

Terugkeren naar overzicht

Wanneer de cliënt de eerste keer aan de slag gaat met de bril in de behandelkamer, is dat het moment om ook de instellingen naar de bril te sturen.

Mocht er geen connectie tot stand komen, controleer dan of:



- Het wifi werkt, en
- Nummers matchen van VR-bril en geselecteerd apparaat.

De instellingen

Algemeen:

Maximale sessieduur De applicatie zorgt ervoor dat binnen dit tijdsbestek de sessie positief wordt afgerond

Balletjestaak:

Duur De duur van de balletjestaak in seconden.

Snelheid De snelheid van het balletje, waarbij 1 het gemiddelde is.

Pad Keuze tussen lineair, ellips, of stuiter.

Combineer met reactietaak Bovenop de balletjestaak wordt nu ook de reactietaak gepresenteerd voor extra werkgeheugenbelasting.

Onvoorspelbaar traject Balletje wisselt onvoorspelbaar van richting; minder interessant bij stuiter pad dat van nature onvoorspelbaar is.

Combineer met klikjes Tijdens de balletjestaak worden bilaterale klikjes afgespeeld.

Wisselende kleur Het balletje verandert van kleur. Een extra taak voor de cliënt kan zijn deze kleur voor zichzelf te benoemen.

Reactietaak:

Duur De duur van de reactietaak in seconden.

Feedback Toont na elke reactie of deze juist of onjuist was. Sommige cliënten raakten afgeleiden wanneer ze dit niet wisten.

Audio:

Duur De duur van de bilaterale klikjes taak in seconden.

Buzzer Speelt op onregelmatige momenten een zoemer-geluid af, waar verder niet op gereageerd hoeft te worden. Belangrijk om dit met de cliënt af te stemmen!