



## Informatie Behandelaar

### Vorbereiding voor de sessie

Zorg ervoor dat de volgende punten in orde zijn voordat je aan de sessie begint

- Stuur de cliënt-informatiebrief op.
- Zorg dat Google-Chrome is gedownload.
- Zorg voor een werkende webcam en microfoon.
- Controleer de internetverbinding.





# Informatie Behandelaar

## Sessie starten

- Open **het Dashboard** in Google Chrome.
- Klik op **'Start Sessie'**.
- Kies voor **EMDR-Remote**.
- Selecteer een bestaande cliënt, of maak een nieuwe aan.
  - ⚠️ Let op! Gebruik hierbij géén persoonlijke gegevens van de cliënt.
- Kopieer de link en stuur deze naar je cliënt.

**Direct starten?** Selecteer dan **'Meedoen'**

**Later ingepland?** Ga naar **'Behandelingen'** en click op het Play icoon om te starten.

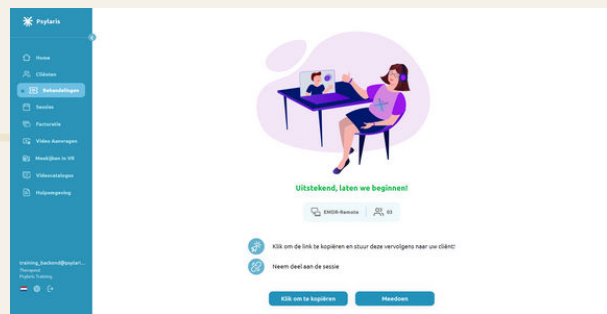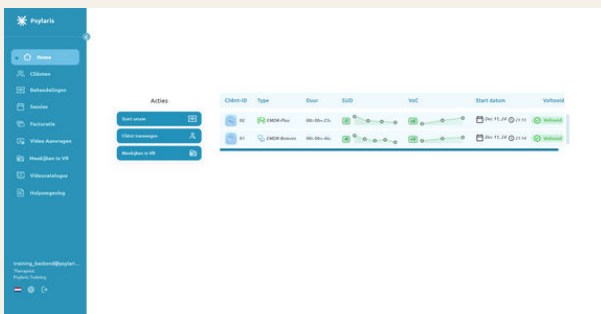



# Informatie Behandelaar

## Videobellen


### Gebruik je het platform voor het eerst?

Sta in de pop-up van Google Chrome toegang tot je camera en microfoon toe voor het videobellen.

Start het videogesprek via het groene hoorntje.

### Zie je alleen jezelf en niet jouw client?

Dan kan het zijn dat jouw client nog niet in de sessie zit, bevestig dit, hang op, en bel opnieuw. Controleer hierbij ook of de client Google Chrome gebruikt.

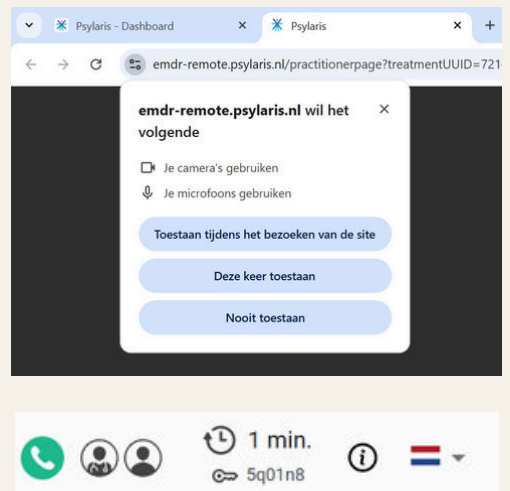

## EMDR-Sessie uitvoeren

*Je kunt de volledige EMDR-ervaring aanpassen aan de behoefte van jouw client via het platform:*

- Stel de werkgeheugenbelasting in met oogbewegingen, interactieve taken, en geluiden
- Voeg tijdens de sessie media toe
- Gebruik de sessielog voor de SUD- en VOC-score en notities

Voor directe ondersteuning, contacteer ons op [support@psylaris.com](mailto:support@psylaris.com) of op **085 200 7339**